

OPTIM™ 33TB

物表清洁消毒液快速使用指南

OPTIM™ 消毒液的有效成分为 0.5% 过氧化氢，具有快速广谱消毒的接触时间，是一种有效的清洁消毒剂，有湿巾和液体两种产品。



OPTIM™ 33TB 湿巾

清洁 - 丢弃 - 清洁



图 1



图 2



图 3

操作步骤：

1. 以 45 度角拉出 OPTIM 33TB 湿巾。关闭盖子（图 1）。
2. 用湿巾清洁物表，去除有机物及可见污渍（图 2）。
3. 如果物表没有严重污染，可以用一面清洁物表，另一面消毒物表。
4. 如果表面严重污染，先用一张湿巾做清洁，再用另一张干净的湿巾对预先清洁过的物表进行消毒，并让物表在标签上注明的接触时间内保持湿润，保证消毒效果。